



Accel® PREvention™/MC Concentrado 48

Limpiador y desinfectante concentrado de superficies en un solo paso

Tuberculocida, virucida, bactericida, fungicida, sanitizante de amplio espectro

Un desinfectante concentrado de amplio espectro de nivel intermedio basado en la tecnología patentada AHP® para ofrecer un rendimiento de limpieza rápido y eficaz.

Características y beneficios

- Eficaz contra patógenos clave, como MRSA, VRE, TB, Norovirus y Poliovirus, que brindan una desinfección de amplio espectro.
- Virucida, bactericida, tuberculocida y fungicida, todo en 5 minutos a la 1:40. También es un sanitizante de amplio espectro de 30 segundos a 1:128 y un limpiador de uso ligero a 1:256
- Compatible con la mayoría de las superficies duras y no porosas al tiempo que aprovecha la potencia de la tecnología AHP®. El principio activo de AHP® se descompone en oxígeno y agua después del uso
- La mejor clasificación de seguridad posible en dilución y no irritante para los usuarios

Aplicaciones

- Limpie y desinfecte dispositivos médicos no críticos, equipos y superficies duras no porosas





Accel® PREvention™/MC Concentrado

Limpiador y desinfectante concentrado de superficies en un solo paso

Instrucciones de uso

Preparación de la solución de uso

Relación	Por litro de agua	Por 32 oz. de agua
1:40	25 mL	0,8 oz
1:128	8 mL	0,25 oz. (1/4 oz)
1:256	4 mL	0,125 oz. (1/8 oz)

Para uso como limpiador y desinfectante de superficies en un solo paso

- Las superficies muy sucias requieren limpieza antes de la desinfección.
- Diluya 1:40 y aplique a la superficie con un paño o toallita desechable.
- Deje que la superficie tratada permanezca mojada durante 5 minutos.
- Deje secar, seque las superficies con un paño para retirar cualquier residuo, o enjuague con agua potable según sea necesario.
- Prepare una solución fresca si la solución está visiblemente sucia o diluida

Para uso como sanitizante sin contacto con alimentos

- Diluya 1:128 y aplique a la superficie.
- Deje que permanezca mojado durante 30 segundos.
- Limpie las superficies con un paño y deje secar al aire

Antes del primer uso en una superficie en particular, se recomienda probar en un área reducida y discreta en caso de tener alguna inquietud sobre la incompatibilidad, o contacte a un representante de Diversey Care.

* Consulte la etiqueta del producto para ver las instrucciones de uso completas

Instrucciones de preparación de la botella de ciclo cerrado de 5L

- Retire el tapón de rosca de la botella de 5 litros de Accel PREvention concentrado.
- Coloque la tapa de acoplamiento* del sistema de dilución personalizada Accel a la botella de 5 l (la tapa de acoplamiento se unirá al inserto dentro de la botella de 5 l para extraer el concentrado).
- Consulte las instrucciones de uso del sistema de dilución personalizada Accel para obtener más instrucciones sobre el sistema de dilución.

*Tapa de acoplamiento de ciclo cerrado incluida

Datos técnicos	Accel® PREvention™/MC Concentrado
DIN	02448629
Certificaciones	EcoLogo
Color/forma	Incoloro, líquido
pH	0,45 (Concentrado) 2,2 (usar dilución 1:40)
Aroma	Característico de los ingredientes
Vida útil	2 años (concentrado), 30 días (dilución de uso)

Producto	Tamaño del paquete	Dilución	Código del producto	
Accel® PREvention™/MC Concentrado	4 contenedores de 4 L / 1,06 U.S. Gal.	1:256	100906586	🇨🇦
Accel® PREvention™/MC Concentrado	2 contenedores de 5 L / 1,32 U.S. Gal.	1:256	100906588	🇨🇦
Accel® PREvention™/MC Concentrado	2 x 1,5 L RTD® / 50,7 oz.	1:256	100940209	🇨🇦

Manipulación segura

Asegúrese de que sus empleados lean y comprendan la etiqueta del producto y la Hoja de datos de seguridad antes de utilizar este producto. La etiqueta contiene instrucciones de uso y tanto la etiqueta como la hoja de datos de seguridad contienen advertencias de peligro, consejos de prudencia y procedimientos de primeros auxilios. Las hojas de datos de seguridad están disponibles en línea en www.diversey.com o por teléfono al 888.352.2249. El uso o disolución inapropiada podría tener como resultado daño a las superficies y lo como consecuencia peligros para la salud y físicos que corresponden a aquellos del concentrado.

AHP y Design® son marcas comerciales registradas de Virox Technologies, Inc. usadas bajo licencia.